




Nipro Safety Butterfly

Nuovo ago a farfalla pratico e sicuro – NIPRO SafeTouch (set per infusione endovenosa)



Ripiegare e trattenere solo le alette (1).
Premere il tappo (2) durante la
retrazione dell'ago

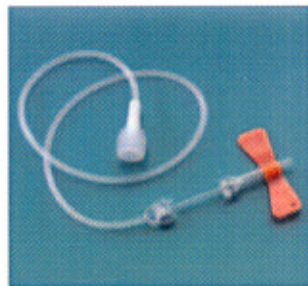


L'ago viene racchiuso nella guaina di
sicurezza, evitando così le punture
accidentali con aghi

Meno rischi di punture accidentali con aghi

- Dopo l'infusione, liberare il meccanismo di sicurezza premendo i lati del tappo durante la retrazione dell'ago
- L'ago scompare all'interno del dispositivo di sicurezza
- Quando senti un clic, l'ago è racchiuso nella guaina di sicurezza

ITE3080415 - Medical Device CE n° 0123

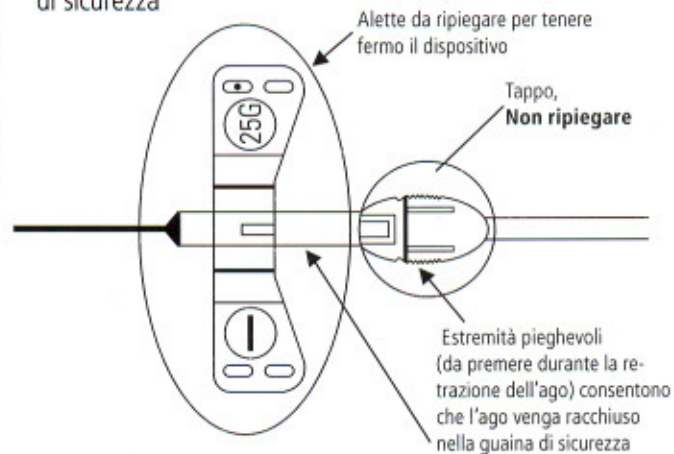

Altri miglioramenti per la tua praticità

- Cannula con ridotto diametro interno
- Cannula di 35 cm di lunghezza per un più facile impiego
- Cannula più morbida per un minore riavvolgimento

CSL Behring S.p.A.

Piazzale S.Türr, 5 - 20149 Milano - Tel. 02 349641 - Fax 02 34964264
customer.service.italia@cslbehring.com